



**Mobility & Comfort for
your active lifestyle**

**Movilidad y Confort para
tu estilo de vida activo**

**Mobilité et confort pour
votre style de vie actif**



ProBasics™ 6" Steel Rollator

6" Wheels



⚠ WARNING: Read ALL warnings and instructions on enclosed insert prior to operating device.

⚠ ADVERTENCIA: Lea TODAS las advertencias e instrucciones en el inserto adjunto antes de operar el dispositivo.

⚠ AVERTISSEMENT : Lisez TOUS les avertissements et instructions sur la notice jointe avant d'utiliser l'appareil.

Save these instructions
Garde estas instrucciones
Conservez ces instructions

COMPASSHEALTH

42-RLS6_01 © 2022



Manufactured for / Fabricado por / Fabriqué pour : Compass Health Brands Corp.
Middleburg Heights, OH 44130 • www.compasshealthbrands.com

Phone / Teléfono / Téliphoner 800.376.7263 • Made in China / Hecho en China / Fabriqué en Chine





5 Adjusting the Handles Ajustando las asas Réglage des poignées

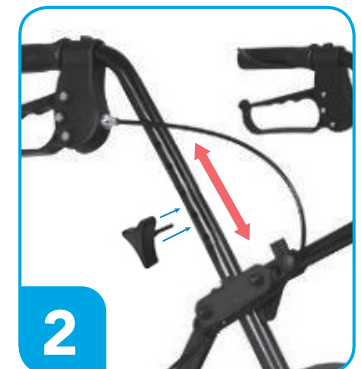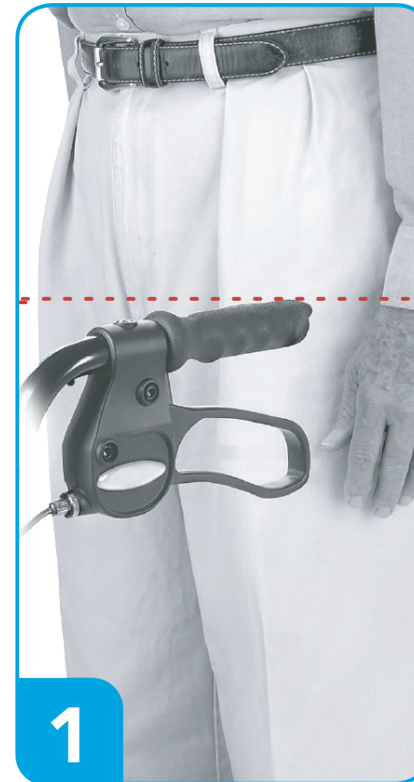

TIP: Adjust handle height.

SUGERENCIA: Luego ajuste la altura de la manija/agarradera.

CONSEIL : réglez la hauteur de la poignée.

4 Backrest Assembly & Braking System Conjunto de respaldo y sistema de frenos Assemblage du dossier et système de freinage

1 Check Parts Revisar partes Vérifier les pièces



1 Push in side buttons and insert backrest.

Presione los botones laterales e inserte el respaldo.

Appuyez sur les boutons latéraux et insérez le dossier.



2

Using the brakes / Usando los frenos



Pull up to apply brakes.
Tire hacia arriba para aplicar los frenos.
Tirez vers le haut pour appliquer les freins.



Release brakes.
Soltar los frenos.
Relâcher les freins.



Push down to lock brakes.
Empuje hacia abajo para bloquear los frenos.
Poussez vers le bas pour verrouiller les freins.

NOTE: Cable needs to be placed outside seating area and frames.


NOTA: El cable debe colocarse fuera de la zona de asientos y los marcos.

REMARQUE : Le câble doit être placé à l'extérieur de la zone d'assise et des cadres.

Rolling walker frame / Cuadro de Andador
Cadre de déambulateur roulant



Full Brake Assembly + Handles + Rear Wheels are all preassembled
El conjunto completo de frenos + manijas + ruedas traseras están todos preensamblados
L'assemblage complet du frein + les poignées + les roues arrière sont tous préassemblés

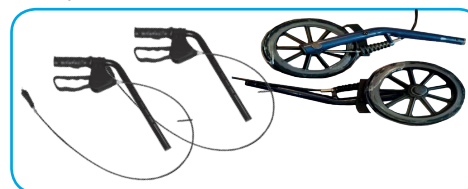

Note: Brake Assembly comes connected to rear wheels.
Nota: El conjunto de frenos viene conectado a las ruedas traseras.
Remarque : L'ensemble de frein est connecté aux roues arrière.

Backrest / Respaldo / Dossier



Rear wheels / Ruedas traseras
Roues arrière



Front wheels / Ruedas frontales
Roue avant



4 Adjustment Knobs for Legs
Perillas de ajuste de altura para piernas
Boutons de réglage des pieds



2 Adjustment Knobs for Arms
Perillas de ajuste de altura para brazos
Boutons de réglage pour bras



Note: Actual items may vary slightly from what is shown.

Nota: Los artículos reales pueden variar ligeramente de lo que se muestra.

Remarque : les articles réels peuvent différer légèrement de ce qui est montré.

2 Handle Assembly Asa de montaje Assemblage de la poignée



1

NOTE: Cable should be outside frame.

NOTA: El cable debe estar fuera del marco.

REMARQUE : Le câble doit être à l'extérieur du cadre.



2

NOTE: The height adjustment knob should be fitted into the receptacle. Turn until fully tightened.

NOTA: La perilla de ajuste de altura debe colocarse en el receptáculo. Gire hasta que esté completamente apretado.

REMARQUE : Le bouton de réglage de la hauteur doit être installé dans le réceptacle. Tourner jusqu'à ce qu'il soit complètement serré.



3



4

3 Front & Rear Wheel Assembly Montaje de rueda delantera y trasera Assemblage des roues avant et arrière




1

NOTE: Replace wheels every 60 miles traveled or when they are visibly worn.

NOTA: Reemplace las ruedas cada 60 millas recorridas o cuando estén visiblemente desgastadas.

REMARQUE : Remplacez les roues tous les 60 milles parcourus ou lorsqu'elles sont visiblement usées.

Hand screw in large hole.
Tornillo de mano en agujero grande.
Visser à la main dans le grand trou.

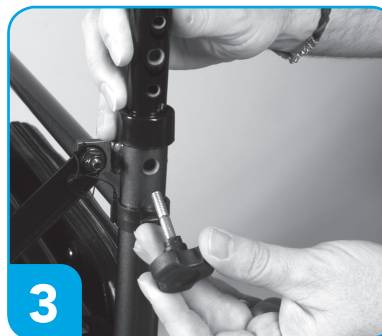

3



2

The legs attach:

1. Via lining up the screw holes on the legs and frame. Use the adjustment knob, screw in to lock into place.

Las piernas se unen:

1. Alineando los orificios de los tornillos en las patas y el marco. Use la perilla de ajuste, atorníllela para bloquearla en su lugar.

Les pieds se fixent :

1. En alignant les trous de vis sur les pieds et le cadre. Utilisez le bouton de réglage, vissez pour verrouiller en place.



4