



Introduction :

Nous vous remercions d'avoir choisi le matelas en mousse comprimée Meridian Medical^{MC} Aruba Contour Groupe 1. Il est destiné à être utilisé avec un cadre de lit de taille appropriée comme faisant partie d'un programme global de prévention des lésions de pression. Toute autre utilisation est interdite. Ce matelas de redistribution de la pression est conçu pour contribuer positivement aux résultats d'un plan de soins de prévention des lésions dues à la pression lorsque le produit est utilisé normalement, selon la définition de Compass Health Brands : la surface de soutien est recouverte d'un drap de lit en coton, en coton mélangé ou en lin, et l'un ou l'autre de ces éléments est le seul élément situé entre la surface de soutien et l'utilisateur.

Ce produit doit **TOUJOURS** être utilisé conjointement avec des jugements infirmiers éclairés lors de l'évaluation du risque de développement de lésions de pression. Cet article est composé d'une âme de mousse thérapeutique qui offre un soulagement de la pression et un confort supérieurs dans trois zones distinctes : la tête et les épaules, le torse ainsi que les extrémités inférieures. Le soulagement de la pression dans ces zones peut aider à prévenir l'occlusion capillaire, le cisaillement, l'abrasion de la peau et l'accumulation d'humidité, autant d'éléments qui peuvent provoquer des lésions cutanées. Avant utilisation, il faut laisser au matelas jusqu'à 8 heures pour qu'il décompresse complètement.

Indication thérapeutique :

Ce matelas en mousse offre une surface permettant de maintenir la peau en bonne santé et de réduire l'apparition de lésions cutanées.

⚠ AVERTISSEMENT : NE PAS ESSAYER D'UTILISER LE MATELAS SANS AVOIR LU TOUTES LES INSTRUCTIONS ET TOUTS LES AVERTISSEMENTS ATTENTIVEMENT. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES.

Contre-indications :

Il n'existe aucune contre-indication relative à l'utilisation de ce produit.

Mode d'emploi :

1. Retirer le matelas de son emballage et le dérouler.
2. Placer la face en vinyle antidérapante du matelas face vers le bas sur la surface du lit. La face imprimée du matelas doit être tournée vers le haut.
3. Pour obtenir les meilleurs résultats, faire pivoter le matelas (de la tête au pied) tous les 6 mois. **TOUJOURS** garder la face imprimée vers le haut.

Nettoyage et entretien :

Le matelas **DOIT** être nettoyé régulièrement et/ou entre deux utilisations avec des patients différents.

- Retirer toute la literie du matelas.
- Essuyer le dessus et le dessous des housses à matelas à l'aide d'un chiffon humide préalablement imbibé d'une solution de nettoyage standard composée d'eau chaude savonneuse et d'un détergent doux.
- Des désinfectants intermédiaires peuvent être utilisés sur les matériaux des housses. Il est recommandé de désinfecter les housses en polyester et/ou en polyuréthane avec un désinfectant à base d'ammonium quaternaire. Un produit à blanchir au chlore dilué (1:10) est également accepté. Les produits phénoliques ne sont **PAS** recommandés pour les matériaux en polyéthylène.
- Il est recommandé de désinfecter les couvertures de fond constituées de matériaux typiquement vinyliques à l'aide de produits phénoliques. Un produit à blanchir au chlore dilué (1:10) est également accepté. Les solutions quaternaires et/ou isopropyliques ne sont **PAS** recommandées.
- Tous les éléments constituant le matelas doivent être séchés minutieusement à l'air libre, hors de la proximité de zones poussiéreuses, avant d'être réutilisés.

⚠ AVERTISSEMENTS :

Compass Health Brands Corp. n'assume aucune responsabilité pour tout dommage ou préjudice si ce produit n'a pas été installé, assemblé ou utilisé adéquatement.

- Avant utilisation, il faut laisser au matelas jusqu'à 8 heures pour qu'il décompresse complètement. En raison du risque potentiel d'exposition infectieuse, le nettoyage avec le patient se trouvant sur le lit n'est **PAS** recommandé. Tout élément visiblement souillé par des fluides corporels doit être



⚠ AVERTISSEMENTS (suite) :

correctement nettoyé ou retiré et tout équipement à proximité doit être inspecté pour vérifier qu'il n'est pas contaminé. Les membres du personnel doivent porter des vêtements de protection appropriés lorsqu'ils nettoient la literie souillée. Suivre les procédures standard de contrôle des infections de l'établissement.

- **NE PAS** ouvrir la fermeture à glissière de la housse du matelas pendant le nettoyage, les procédures de contrôle des infections ou l'utilisation.
- **NE PAS** envoyer les housses à matelas à la blanchisserie ni les stériliser à l'autoclave.
- **NE PAS** exposer à la lumière directe du soleil.
- **NE PAS** tremper dans l'eau.
- **NE PAS** laisser d'objets lourds ou durs sur le matelas.
- **NE PAS** utiliser le matelas s'il est endommagé.
- En cas d'utilisation, un risque accru de coincement du patient est possible en raison de la compression du matelas. À intervalles réguliers, contrôler l'espace entre le matelas, le lit et/ou la ridelle. Les matelas **DOIVENT** s'adapter au cadre du lit et aux ridelles et, en cas d'espace, le matelas doit être remplacé.
- Consulter le site Web de la FDA à l'adresse <http://www.fda.gov> pour en savoir plus sur les risques de coincement. Consulter les manuels d'utilisation des lits et des ridelles pour obtenir des informations supplémentaires sur la sécurité. **TENIR** à l'écart des produits chimiques corrosifs et des sources inflammables.

Spécifications :

Longueur : 80 po (+/- 0,5 po)

Largeur : 36 po (+/- 0,5 po)

Hauteur : 6 po (+/- 0,5 po)

Garantie limitée :

Cette garantie est valable uniquement pour l'acheteur original. Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et a été soigneusement inspecté avant l'expédition. Votre produit de marque Meridian Medical^{MC} est garanti contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant une période de garantie de deux ans sur l'âme en mousse à compter de la date d'achat et une garantie d'un an sur la housse à matelas, qui est sujette à une usure normale et peut nécessiter un remplacement périodique. Si pendant la période de garantie il est prouvé que le produit est défectueux, celui-ci sera entretenu ou remplacé à la discrétion de Compass Health Brands. Cette garantie ne couvre pas les défaillances causées par une usure normale ou une utilisation inappropriée de l'appareil.

Dans le cas d'une défektivité couverte par la garantie, l'appareil sera entretenu ou remplacé à notre discrétion. Cette garantie ne prévoit que le remplacement des pièces défectueuses et ne couvre pas les frais d'expédition ni de main d'œuvre. La seule obligation de Compass Health Brands et le seul service exclusif qui vous est offert en vertu des conditions générales de cette garantie se limitent aux entretiens et au remplacement de l'appareil.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits dont le numéro de série a été supprimé ou altéré, ou aux défauts ou dommages causés par des pièces non autorisées, des pièces ajoutées ou des réparations non conformes. La garantie ne s'applique pas non plus en cas de négligence, d'accident ou de toute circonstance hors du contrôle de Compass Health Brands, notamment un mauvais fonctionnement, entretien ou entreposage.

Si vous avez une question à propos de votre produit Compass Health Brands ou de la garantie, veuillez communiquer avec un revendeur autorisé de la marque Compass Health Brands.

Fabriqué pour :

Compass Health Brands

6753 Engle Road

Middleburg Heights, OH 44130

Tél. : (800) 376-7263

www.compasshealthbrands.com

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!