



THE ORIGINAL

**BED BUDDY®**

## LA CHALEUR HUMIDE

# Enveloppe Confort

**Soulagez les muscles fatigués et apaisez la tension grâce à l'effet calmant de la thérapie à chaleur humide.**

Parfumée avec des huiles essentielles et des herbes naturelles afin de soulager vos articulations endolories et vos muscles fatigués, et redonner vie à vos sens.

Placez simplement au four à micro-ondes pour profiter de l'effet calmant d'une chaleur humide ou au congélateur pour obtenir une compresse froide.



No de produit - BBF4011-12

### **DIRECTIVES SUR L'UTILISATION\***

#### **Pour la thermothérapie :**

- Instructions basées sur un four à micro-ondes de 900 Watts.
- Commencez par chauffer Bed Buddy Enveloppe Confort pendant 30 secondes.
- Pour réchauffer, placez au four à micro-ondes pendant 15 secondes jusqu'à un maximum de 1 minute 15 secondes.
- N'oubliez jamais de toucher le produit avant de l'utiliser.
- Appliquer 15-20 minutes. Répétez toutes les 2 heures ou selon les directives de votre fournisseur de soins de santé.

#### **Pour la cryothérapie :**

- Placez Enveloppe Confort dans un sac en plastique scellé au congélateur jusqu'à 8 heures pour atteindre une température optimale. Enveloppe Confort ne doit être appliqué sur la zone en relief que pendant 15 à 20 minutes. Répétez toutes les 1 heure ou selon les directives du fournisseur de soins de santé.

#### **Consignes de nettoyage :**

Nettoyez les taches avec un linge humide. Laissez sécher avant l'utilisation.

**\*AVERTISSEMENT :** Lisez les instructions et les avertissements supplémentaires sur l'étiquette de mise en garde et la notice jointe avant utilisation. Suivez **TOUJOURS** attentivement les instructions de chauffage, d'utilisation et d'avertissement. Le non-respect des instructions sur le produit et l'emballage peut entraîner un incendie, des brûlures ou des gelures. Ce produit contient du blé et de la lavande.