

# CAREX®

ITEM# FGE801C0 0000 - 24ct

ITEM# FGE802C0 0000 - 48ct

ITEM# FGE803C0 0000 - 72ct

## Sacs pour commode

Munis d'une poudre ultra-absorbante



**⚠ Veuillez lire toutes les instructions avant le montage ou l'utilisation.**

### Utilisation :

- Retirer le sac de la boîte en faisant bien attention de ne pas laisser échapper la poudre absorbante.
- Ouvrir le sac et le placer dans le réservoir de la commode; retourner les poignées par-dessus le rebord du réservoir de la commode.
- Les sacs ont des usages divers et peuvent absorber jusqu'à 1,89 l de liquide.
- Changer le sac lorsqu'il est plein ou au besoin : retirer soigneusement le sac en utilisant les poignées.
- Refermer le sac en attachant les poignées.
- Jeter à la poubelle, **PAS DANS LES TOILETTES.**

### ⚠ AVERTISSEMENT :

Même une petite quantité de poudre absorbante bouchera votre toilette. Les sacs doivent être jetés dans une poubelle.

**NE PAS JETER LES DÉCHETS HUMAINS OU LES SACS DANS LA TOILETTE.**

**COMPASSHEALTH**

42-FGE801C0\_00 © 2023

Manufactured for / Fabriqué pour : Compass Health Brands Corp.  
Middleburg Heights, OH 44130 • [www.compasshealthbrands.com](http://www.compasshealthbrands.com)  
Phone / Téléphone 800.376.7263 • Made in China / Fabriqué en Chine