

Lit électrique complet

Manuel de l'utilisateur et guide en cas de coincement

À utiliser avec les n^{os}
d'article

HBFEBED
HBFEBE
HBFEES



Ce manuel doit être lu dans son intégralité par les utilisateurs du lit, les soignants et le personnel d'entretien avant l'assemblage ou l'utilisation.

Manuel de l'utilisateur	3 à 16
Avertissements	3 à 5
Remarques particulières	5
Éléments constitutifs du lit	6
Instructions d'assemblage	7 à 13
Fonctionnement de la commande manuelle	14
Réglage optionnel de la hauteur de la tête/du pied de lit	15
Entretien et contrôles de sécurité	15
Électronique	15
Cadre de lit et surface de couchage	15
Nettoyage	15
Lubrification et mécanique	15
Schéma du lit	16
Spécifications	17
Garantie	17

VEUILLEZ LIRE TOUTS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES PRÉCAUTIONS AVANT L'UTILISATION

- **NE PAS** utiliser dans des environnements enrichis en oxygène ou à proximité de gaz inflammables ou explosifs.
- Risque d'incendie en cas d'utilisation avec un équipement d'administration d'oxygène autre que le type nasal ou masqué.
- En cas d'utilisation d'un équipement d'administration de type nasal ou masqué, les tubes à oxygène ou à air **DOIVENT** être acheminés et fixés correctement pour éviter qu'ils **NE S'EMMÈLENT** et ne finissent par se rompre pendant le fonctionnement normal du lit manuel/électrique.
- Les liquides peuvent exposer à des risques électriques. En cas de déversement à l'intérieur ou autour du lit, débrancher immédiatement le lit et laisser la zone sécher complètement avant de rebrancher le lit. En cas de déversement, **DÉBRANCHER** immédiatement le lit. Nettoyer le déversement et laisser le lit ou la zone sécher complètement avant d'utiliser à nouveau les commandes électriques.
- Ce lit est conçu pour les adultes uniquement. **NE PAS** l'utiliser avec ou pour des enfants. Les enfants doivent être surveillés de près à tout moment lorsqu'ils se trouvent à proximité du lit.
- Les utilisateurs qui ne sont pas en mesure de comprendre ou de suivre ces instructions et ces avertissements ou qui ont des capacités physiques limitées doivent être surveillés ou assistés lorsqu'ils se servent du lit.
- **NE JAMAIS LAISSER QUICONQUE SE TROUVER SOUS LE LIT À QUELQUE MOMENT QUE CE SOIT.**
- Lors de l'utilisation ou du déplacement du lit, **TOUJOURS** vous assurer que la personne qui utilise le lit est correctement positionnée dans les limites du lit.
- **TOUJOURS** vous tenir à l'écart des pièces mobiles lors du réglage du lit. Le patient doit être centré sur le lit, les extrémités se trouvant dans la zone du matelas. **NE PAS** laisser les extrémités dépasser sur les côtés ou entre les ridelles.

- **NE PAS** utiliser ce lit pour le transport de patients. **NE PAS** déplacer le lit alors qu'il est occupé, sous peine de blessures ou de dommages.
- La charge de travail admissible maximale de ce lit (patient, matelas, literie et accessoires) est de 450 lb (204 kg). Le poids maximum de l'utilisateur est de 350 lb (158 kg). **TOUJOURS** respecter les limites de poids.
- **NE PAS** vous tenir debout ou monter sur le lit.
- Le lit est conçu pour un seul occupant. **NE JAMAIS** laisser plus d'une personne s'asseoir ou s'allonger simultanément sur le lit.
- Pour éviter que le patient ne se blesse en tombant, **TOUJOURS** laisser le lit à sa hauteur la plus basse lorsque le patient n'est pas sous surveillance.
- Une manipulation inappropriée du cordon d'alimentation peut provoquer un risque électrique.

Inspecter régulièrement le cordon et la fiche pour vérifier qu'ils ne sont pas endommagés, par exemple, qu'ils ne sont pas tortillés ou effilochés; **NE PAS** utiliser si le cordon ou la fiche sont endommagés; communiquer avec votre revendeur pour la réparation ou le remplacement.

NE PAS débrancher l'appareil en tirant sur le cordon, ce qui risquerait d'endommager la connexion de la fiche. **NE JAMAIS** tirer, secouer, tordre ou plier fortement le cordon, en particulier près de la connexion de la fiche.

NE PAS utiliser ce produit avec des barres d'alimentation ou des rallonges électriques. **NE PAS** surcharger les prises de courant murales. **TOUJOURS** connecter ce produit à la prise de tension appropriée; **NE PAS** l'utiliser avec un convertisseur de CC en CA.

- **TOUJOURS** faire attention en acheminant les cordons d'alimentation des accessoires ou d'autres équipements dans l'espace situé sous le lit. Les cordons doivent être fixés de manière à ne pas être pincés ou endommagés par les parties mobiles du lit. Les cordons endommagés ne doivent **PAS** être utilisés.
- Il incombe au médecin du patient et au soignant d'évaluer le patient et de déterminer quels dispositifs et accessoires sont nécessaires pour soutenir et protéger le patient, tout en limitant les risques qu'il encourt. L'utilisation de mécanismes de protection contre les chutes, de gestion de la pression et d'aide au transfert doit être envisagée le cas échéant.



DANGER! Le coincement peut causer des blessures chez le patient, voire sa mort.

AVERTISSEMENTS.

- **NE PAS** utiliser ce lit avec des matelas ou des ridelles incompatibles. Reportez-vous à la page 17 de ce manuel ou communiquez avec votre revendeur Compass Health pour obtenir de l'aide dans l'achat de modèles compatibles.
- Après l'assemblage ou l'entretien du lit, vérifier que toutes les sections sont bien en place et que tous les composants électriques fonctionnent comme prévu **AVANT** l'utilisation.
- **TOUJOURS** bloquer les roulettes pour empêcher le lit de bouger lorsqu'il est occupé. Même lorsque les roulettes sont bloquées, il arrive que certaines surfaces de plancher laissent le lit se déplacer légèrement; l'utilisation du lit sur de telles surfaces de plancher devant être évaluée par le prestataire de soins.
- **NE PAS** essayer d'utiliser les commandes du lit si celui-ci n'est pas entièrement assemblé, au risque d'endommager les éléments constitutifs du lit.
- Une fois le lit entièrement assemblé, **TOUJOURS** vérifier que toutes les sections du lit sont correctement et solidement en place avant de l'utiliser.
- **TOUJOURS** utiliser le dispositif de blocage des roulettes, sauf pour déplacer le lit.
- Le poids du corps doit être réparti uniformément sur la surface du lit. **NE PAS** vous allonger, vous asseoir ou vous pencher de manière à ce que tout le poids du corps soit placé uniquement sur les parties surélevées de la tête ou du pied de lit. Ceci s'applique également à l'aide apportée à l'utilisateur pour le repositionner ou le transférer dans le lit ou hors du lit.
- **NE PAS** permettre à plus d'une personne de monter sur/dans le lit à tout moment.
- **NE PAS** utiliser à l'extérieur.
- Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, cesser de l'utiliser et appeler un technicien qualifié pour qu'il l'examine et le répare.
- Veiller à ce que toutes les pièces mobiles y compris le cadre principal du lit, le plateau du matelas (ressorts/sections de tête et de pied) et tous les arbres d'entraînement ne soient pas obstrués (c.-à-d. couvertures/draps, couvertures chauffantes/coussins, tubes, câbles, etc.), et autres types de produits utilisant des cordons électriques qui peuvent s'emmêler autour du lit, des ridelles latérales ou des pieds) pendant le fonctionnement du lit.
- Maintenir le produit à une distance minimale de 12 po de toute source de chaleur directe. Vérifier que les ressorts/sections de tête et de pied sont bien reliés aux extrémités du lit avant de l'utiliser.
- **NE PAS** utiliser le lit pour transporter une personne dans ou sur le lit. Autrement, des blessures ou des dommages pourraient survenir.
- Lors d'un transfert dans le lit ou hors du lit, **TOUJOURS** utiliser le dispositif de blocage des roulettes. Vérifier que le dispositif de blocage des roulettes est correct avant d'utiliser le lit. Même si les roulettes sont correctement bloquées, il arrive que certaines surfaces de plancher, telles que le carrelage ou le bois, laissent le lit se déplacer dans certaines conditions. L'utilisation sur de telles surfaces **DOIT** être évaluée par le prestataire de soins.
- L'installation initiale de ce lit doit être effectuée par un technicien qualifié.
- La limite totale de poids du lit électrique ProBasics (y compris les accessoires, le matelas, l'occupant et tout autre personne ou objet placé sur le lit) est de 450 livres (204 kg); 350 livres (158 kg) pour le poids du patient.
- L'une des caractéristiques de sécurité de ce modèle de lit est la protection contre la surchauffe causée par des périodes de fonctionnement excessives ou prolongées. Selon la durée, il peut s'agir de réglages multiples/répétitifs ou de l'utilisation de plusieurs fonctions simultanément. Pour garantir un fonctionnement sans problème, **TOUJOURS** laisser une légère pause entre les réglages multiples et **ÉVITER** d'appuyer sur plusieurs boutons de fonction à la fois. Si la protection thermique est activée, le lit ne répondra pas aux commandes. Pour résoudre ce problème, relâcher le bouton de la commande et laisser le lit reposer pendant plusieurs minutes. La durée de la fonction de protection sera alors réinitialisée et le lit fonctionnera à nouveau. Selon le degré de surchauffe, cette opération peut durer jusqu'à 30 minutes.
- **TOUJOURS** retirer la ou les manivelles avant d'effectuer des fonctions électroniques ou d'utiliser le lit. En cas de non-retrait, la ou les manivelles tourneront avec le moteur en marche, ce qui pourrait provoquer des blessures ou endommager le lit. **TOUJOURS** débrancher le lit de la prise électrique avant de nettoyer.
- **NE PAS** ouvrir les assemblages tels que les moteurs, la commande, les boîtes de

AVERTISSEMENTS.

- connexion ou les boîtes d'engrenage. Aucune pièce n'est réparable par l'utilisateur. Seuls des techniciens qualifiés sont autorisés à réparer ces pièces. Si des personnes non qualifiées effectuent des travaux sur ces lits, la garantie est annulée.
- Après utilisation, une certaine déformation permanente du lit sous l'effet de la charge peut se produire. Ce phénomène est normal et attendu, à moins qu'il n'affecte la fonction du lit. Un léger affaissement ou une légère flexion au centre du lit après utilisation ne représentent pas un risque ou une avarie compromettant la sécurité.
 - **NE PAS** placer la commande sous ou entre des objets. Cela pourrait entraîner l'activation involontaire des caractéristiques du lit et provoquer des blessures ou des dommages.
 - Si un bouton de la commande ne se déclenche pas ou se bloque, le sommier ne s'arrêtera pas de bouger. Inspecter le revêtement du panneau de commande du lit et du panneau de commande du patient pour vous assurer qu'il n'est pas fissuré ni endommagé.
 - **TOUJOURS** tenir les cordons électriques à l'écart des surfaces chauffées ou chaudes.
 - **NE JAMAIS** faire fonctionner l'appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si le lit ne fonctionne pas correctement, cesser de l'utiliser et appeler un technicien qualifié pour qu'il l'examine et le répare.
 - Confier l'entretien de l'appareil à un personnel qualifié **UNIQUEMENT**. La fiabilité de la mise à la terre dépend d'une prise de courant murale correctement mise à la terre. **TOUJOURS** débrancher le lit de la prise de courant avant d'y effectuer toute opération d'entretien ou de maintenance.
 - **NE PAS** débrancher le cordon d'alimentation de la boîte de connexion. Le cordon sera alors endommagé.
 - Faire attention en débranchant la commande, **NE PAS** appuyer sur les boutons de la commande.
 - Lorsque le lit n'est pas utilisé pendant une période prolongée, débrancher le lit électrique de la prise de courant murale.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

REMARQUES PARTICULIÈRES

AVIS :



- Les renseignements contenus dans ce document peuvent faire l'objet d'amendement sans préavis.
- Les **AVERTISSEMENTS/MISES EN GARDE** figurant dans le présent manuel s'appliquent à des risques ou à des pratiques dangereuses susceptibles d'entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.
- Vérifier que toutes les pièces ne sont pas endommagées par l'expédition et les tester avant de les utiliser.
- En cas de dommage, **NE PAS** utiliser.
- Communiquer avec le revendeur pour recevoir des instructions supplémentaires.
- Votre lit électrique a été conçu pour un fonctionnement fiable.
- Le lit a été soigneusement testé et inspecté avant d'être expédié.


INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES ET CONTRE-INDICATIONS

- Ce lit est destiné à être utilisé dans le cadre de soins à domicile, avec des adultes (personnes pesant au moins 88 lb [40 kg], mesurant au moins 57 po [146 cm], avec un IMC d'au moins 17).
- Ce lit n'est **PAS** destiné à être utilisé dans un hôpital ou un établissement de soins de longue durée. Ce lit n'est **PAS** destiné à être utilisé avec des enfants.
- Ce lit n'est **PAS** destiné au transport de patients – le lit ne doit **PAS** être déplacé alors qu'il est occupé.
- Ce lit est destiné à être utilisé dans l'environnement d'application 4, tel que défini dans la norme IEC 60601-52-2-2015.



Vérifier que toutes les pièces sont présentes.

- A. Ressort de pied
- B. Ressort de tête
- C. Tête de lit
- D. Pied de lit
- E. Arbre Haut/Bas
- F. Goupilles de verrouillage (4)
- G. Moteur
- H. Manivelle* (fixée au pied de lit pour l'expédition)
- I. Roulettes (4) – 2 avec dispositif de blocage, 2 sans
- J. Clips à ressort (2)
- K. Commande manuelle
- L. Moteur électrique complet

* La manivelle ne permet de relever ou d'abaisser la hauteur du lit qu'en cas de panne de courant.

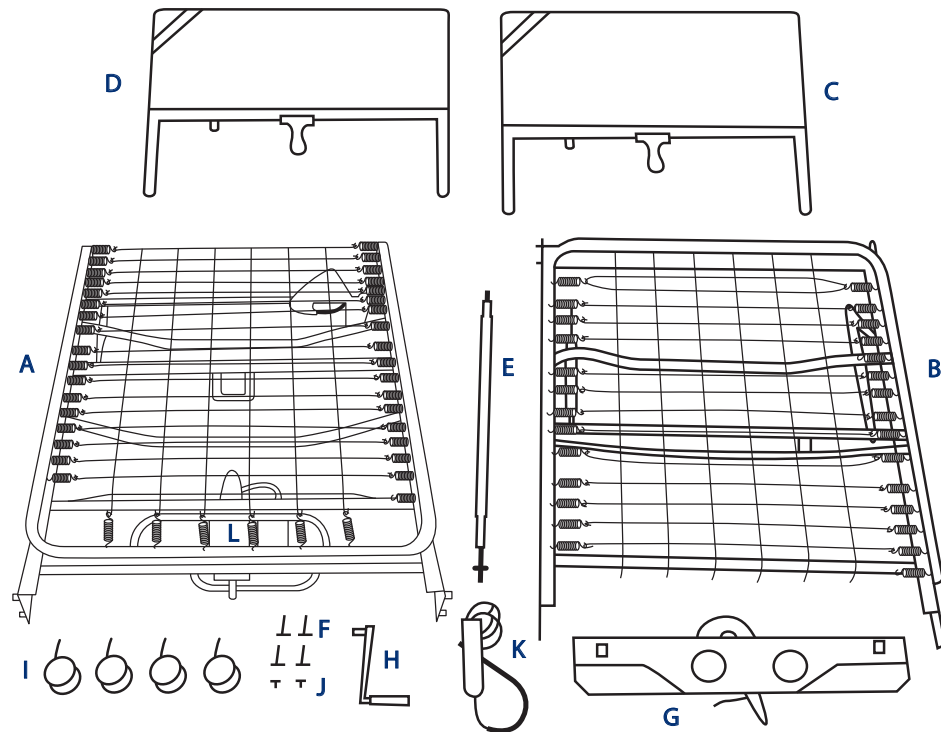


INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DU CADRE

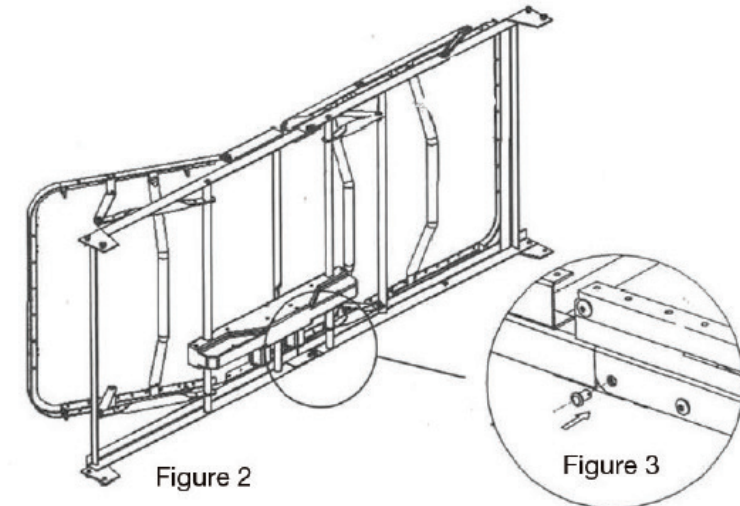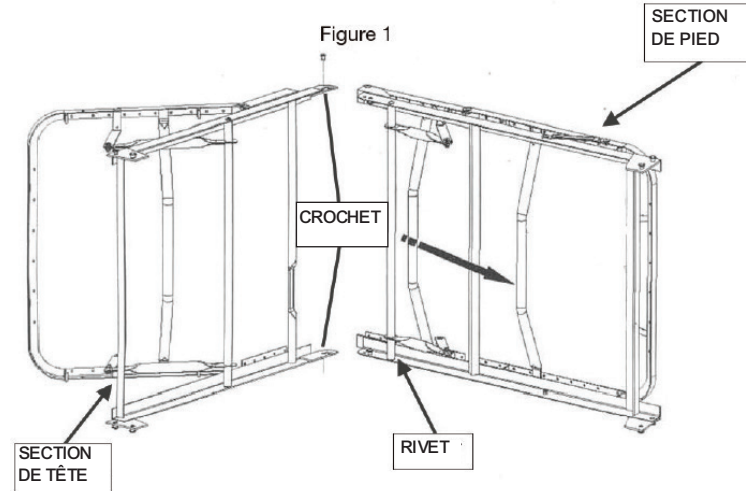

REMARQUE : Le revêtement à ressorts n'est pas illustré pour plus de clarté.

- Poser la tête et le pied de lit sur le côté, à environ 90° l'un de l'autre (voir figure 1).
- Faire glisser les sections ensemble jusqu'à ce que le crochet de la section de tête attrape le rivet de la section de pied.
- Redresser les sections et les positionner comme indiqué dans la figure 2.
- Positionner l'aile de tête comme indiqué.
- Les deux sections étant de niveau, installer une goupille de verrouillage du cadre dans chaque côté du cadre, comme indiqué sur la figure 3.
- Veiller à installer correctement les goupilles de verrouillage du cadre avant utilisation

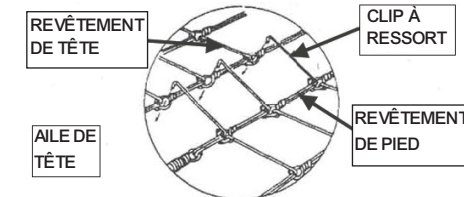


AVERTISSEMENTS : Les goupilles de verrouillage doivent être installées pour garantir un fonctionnement/une utilisation sécuritaire.

- Relier les moitiés de revêtement ensemble à l'aide des clips à ressort qui sont fixés au revêtement de pied.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

Figure 4


Coupleur à ressort

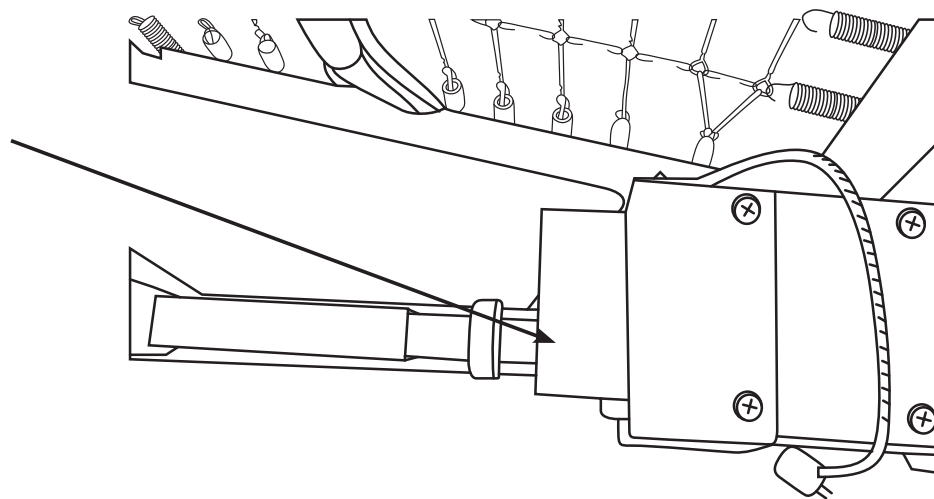

- Installer l'arbre d'entraînement Haut/Bas dans le moteur Haut/Bas situé sur la section de pied.
- Insérer le côté à ressort de l'arbre d'entraînement dans le réceptacle inférieur, comme indiqué.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

Figure 5

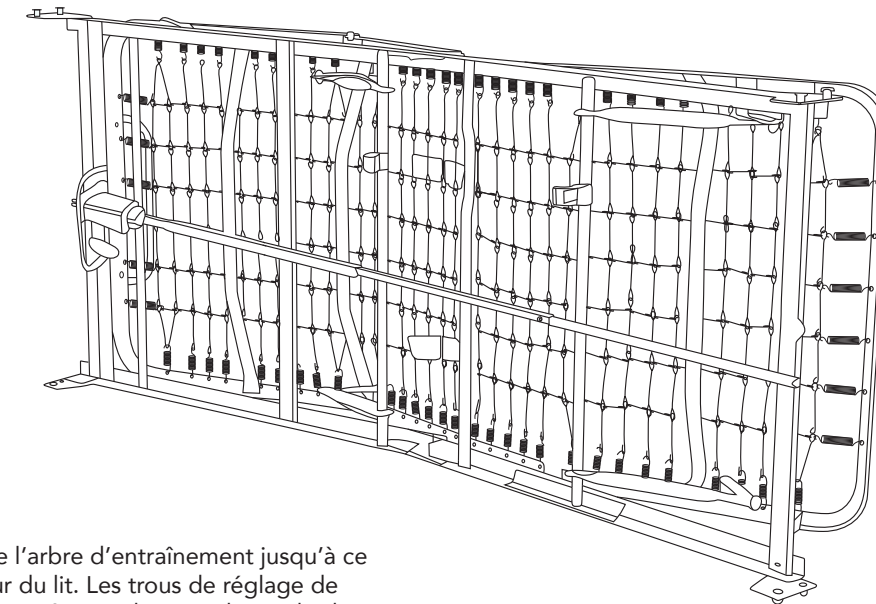

- Le lit étant sur le côté, étendre l'arbre d'entraînement jusqu'à ce qu'il atteigne toute la longueur du lit. Les trous de réglage de l'arbre d'entraînement sont marqués pour les semi-lits ou les lits complets. Choisir le trou pour le lit complet.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

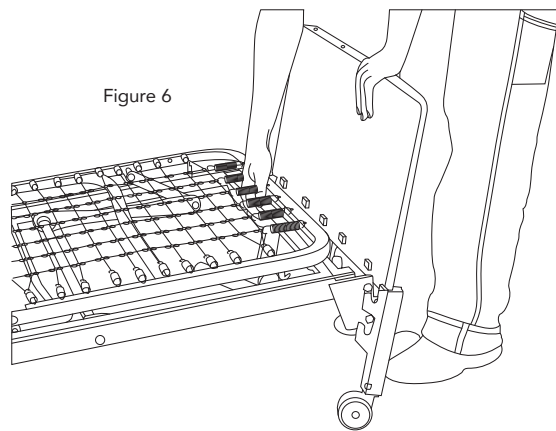


Figure 6

- Installer les roulettes en insérant la tige de la roulette dans le réceptacle du pied. **TOUJOURS** installer une roulette verrouillable et une roulette non verrouillable à chaque extrémité du lit. **TOUJOURS** installer les roulettes de blocage en diagonale l'une par rapport à l'autre.
- Fixer la tête de lit et les pieds de lit.
- **TOUJOURS** veiller à ce que les deux crochets situés de chaque côté de la tête et du pied de lit soient bien engagés dans les deux rivets de verrouillage situés de chaque côté du cadre de lit.

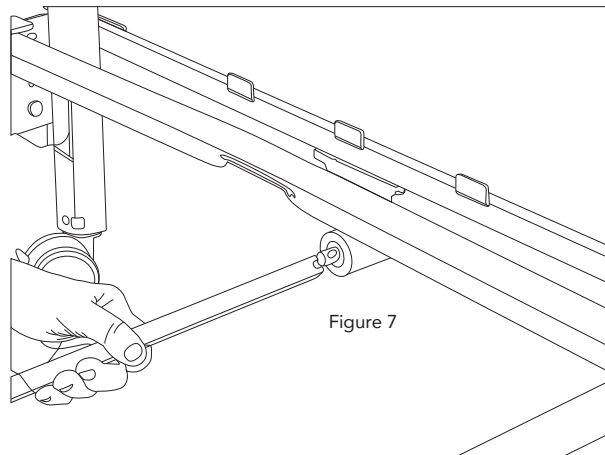


Figure 7

- Installer la tête de l'arbre d'entraînement comme indiqué.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE (SUITE)

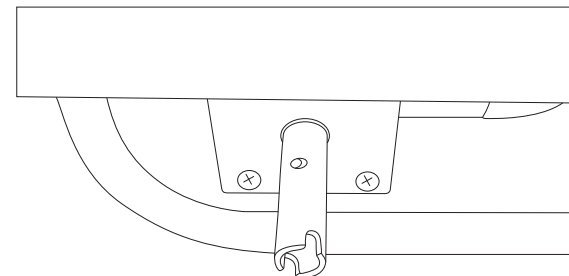


Figure 8

- Relâcher le coupleur à ressort du moteur haut/bas et insérer l'arbre d'entraînement dans la boîte d'engrenages située sur le pied de lit.

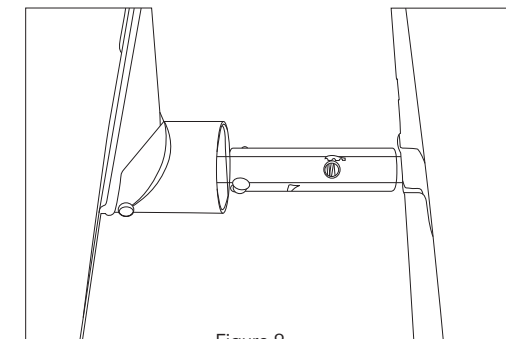


Figure 9

- Veiller à ce que la fente du coupleur à ressort s'engage complètement dans la goupille cylindrique de la boîte d'engrenages du pied de lit.

INSTALLATION DU MOTEUR

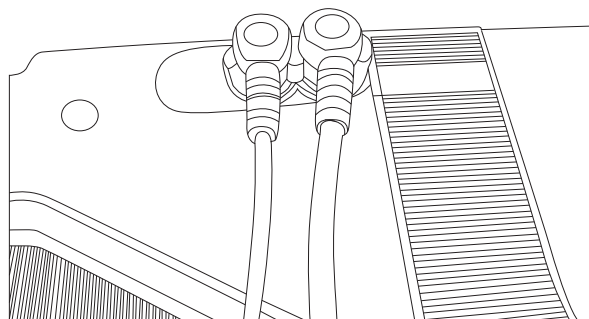


Figure 10

- Pour faciliter l'installation, avant d'installer le moteur, brancher les câbles de la commande manuelle et du moteur Haut/Bas dans le moteur, comme indiqué.



AVERTISSEMENT :

NE JAMAIS utiliser de matelas qui **NE** correspondent **PAS** à la largeur (36 po) et à la longueur (80 po) du cadre de lit. L'utilisation de matelas de dimensions inférieures ou supérieures peut entraîner un coincement et des blessures corporelles, voire la mort.

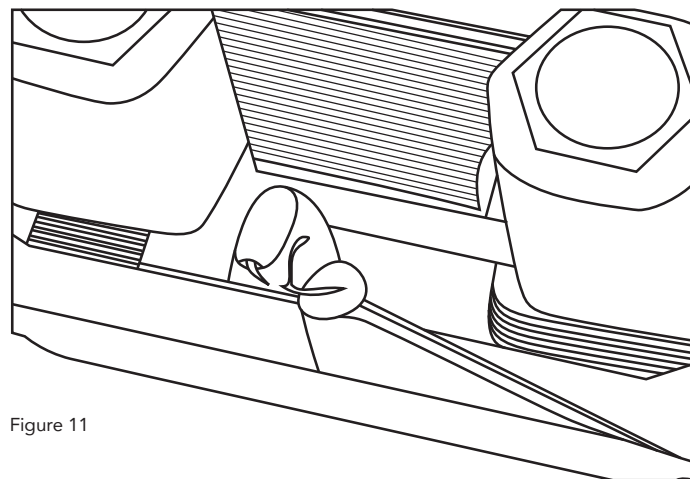


Figure 11

- Brancher deux batteries de 9 V (non fournies) sur la pince de batterie située sur la pince de batterie située dans un renforcement sous le couvercle du moteur. Une fois la batterie chargée, le moteur peut fonctionner en cas de panne de courant.

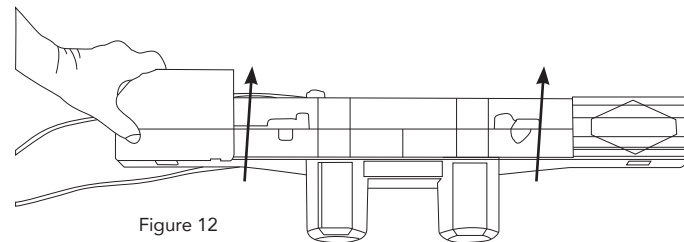


Figure 12

- Pour installer le moteur, retirer les deux capuchons de verrouillage situés en haut du moteur.

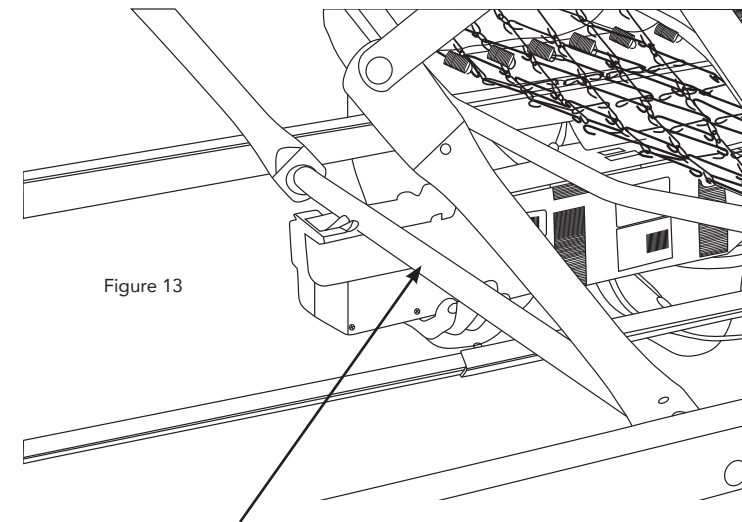


Figure 13

Tige de l'actionneur

- Aligner le moteur avec la tige de l'actionneur et relever le ressort de tête jusqu'à la position la plus haute. Le moteur sera tiré vers le lit et bloqué sur la tige de l'actionneur. Répéter l'opération pour la section de pied.
- Une fois le moteur complètement installé, faire glisser les deux couvercles de verrouillage sur le moteur.
- Une fois l'ensemble assemblé et vérifié, brancher l'unité pour tester le fonctionnement et vous assurer que le lit fonctionne correctement.
- Avant de placer un matelas sur le cadre de lit assemblé, relever la protection du matelas au pied du cadre de lit pour réduire le mouvement du matelas pendant l'utilisation.

FONCTIONNEMENT DU LIT

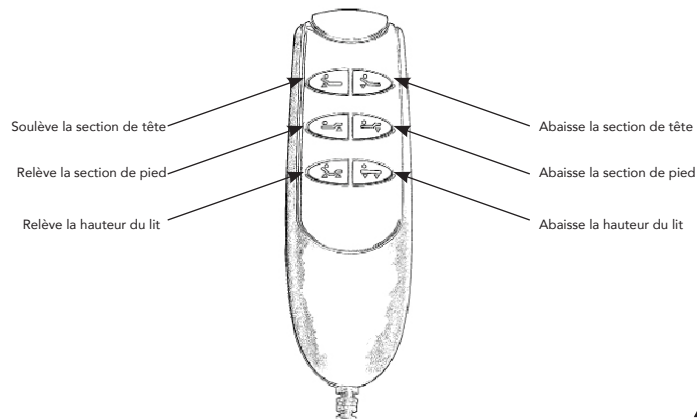


Figure 14

Fonctionnement sur batterie

Le lit électrique complet peut être abaissé en cas d'urgence lorsqu'il est équipé de deux batteries de 9 V (non incluses). Le fonctionnement sur batterie ne peut être utilisé qu'une seule fois et uniquement pour abaisser les sections de tête et de pied du lit. Remplacer les batteries de 9 V tous les ans ou après avoir utilisé le fonctionnement sur batterie pour abaisser le lit.

Manivelle

Le lit entièrement électrique est équipé d'une manivelle manuelle amovible qui peut être utilisée lorsque le courant électrique ou la batterie ne sont pas disponibles. La manivelle permet uniquement de relever ou d'abaisser le plateau du lit en cas de panne de courant. Elle ne permet pas de relever ou d'abaisser les ressorts de tête ou de pied.





AVERTISSEMENT

TOUJOURS retirer la manivelle manuelle **AVANT** d'effectuer une opération électrique. **NE PAS** utiliser les fonctions électriques lorsque la manivelle manuelle est installée sur le lit, sous peine d'endommager le produit et de blesser quelqu'un.

Transferts dans le lit

Lors d'un transfert dans le lit ou hors du lit, **TOUJOURS** vérifier que les roulettes de blocage sont en position verrouillée. La hauteur du lit peut être réglée vers le haut ou vers le bas, selon les besoins, pour rendre le transfert plus sûr et plus facile pour l'utilisateur du lit.

RÉGLAGE OPTIONNEL DE LA HAUTEUR DE LA TÊTE/DU PIED DE LIT

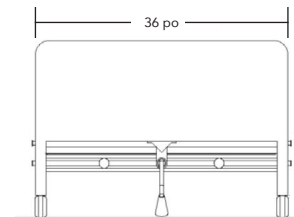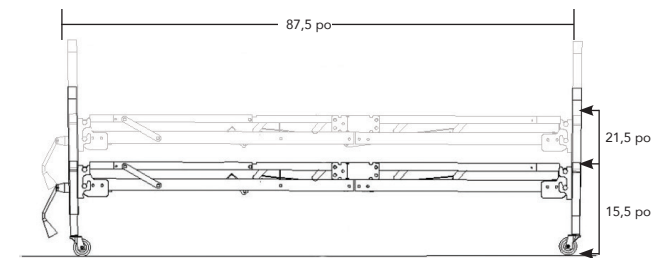

ENTRETIEN ET CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

À effectuer une fois par an ou entre deux placements par un technicien qualifié.

Électronique

Vérifier toutes les commandes pour vous assurer que toutes les fonctions fonctionnent correctement.

- Cordon d'alimentation
- Cordon de la commande
- Vérifier que tous les fils sont acheminés et fixés correctement de sorte qu'ils n'interfèrent pas avec les pièces mobiles.
- Vérifier que toutes les fiches sont complètement insérées ou fixées.
- Remplacer la batterie de 9 V une fois par an ou après chaque utilisation.

Cadre de lit et surface de couchage

Vérifier visuellement toutes les soudures

- Section de tête
- Section des genoux
- Cadre principal
- Vérifier que les fixations des joints entre les sections de la surface de couchage ne sont pas desserrées.

Nettoyage


Les parties métalliques du lit sont recouvertes d'un revêtement époxy cuit au four. Nettoyer toutes les parties revêtues avec un détergent doux et de l'eau chaude. Relever périodiquement les sections de tête et de pied du lit et dépoussiérer le cadre. En outre, retirer périodiquement le matelas et nettoyer le plateau du matelas. Procéder au nettoyage si nécessaire ou entre deux placements.

Lubrification et mécanique

- Graisser légèrement tous les filetages des vis de l'actionneur avec de la graisse blanche au lithium.
- Lubrifier tous les roulements des roulettes et des pivots avec de l'huile de machine légère.
- Vérifier tous les boulons et les serrer si nécessaire.

LIT ÉLECTRIQUE COMPLET PROBASICS

1. Tête de lit
Pied de lit
2. Ressort de tête
3. Ressort de pied
4. Cadre du panneau de tête de lit
5. Cadre du panneau de pied de lit
 - a. Assemblage de l'engrenage de la tête de lit
 - b. Assemblage de l'engrenage du pied de lit
6. Crochet de la surface de couchage
7. Supports de moteur (a, b, c)
8. Boîtier d'engrenage du moteur Haut/Bas
 - a. Arbre du moteur
 - b. Connecteur d'arbre Haut/Bas
9. Jeu de roulettes (2 avec dispositif de blocage / 2 sans)
10. Réceptacle des roulettes
11. Tringlerie du cadre
12. Commande à la main
13. Barre d'actionnement de tête
14. Barre d'actionnement de pied
15. Panneau de pied de lit
Panneau de tête de lit
16. Moteur
 - a. Support du moteur
17. Capuchon du moteur
18. Sangle du moteur
19. Goupille de verrouillage du lit
20. Manivelle

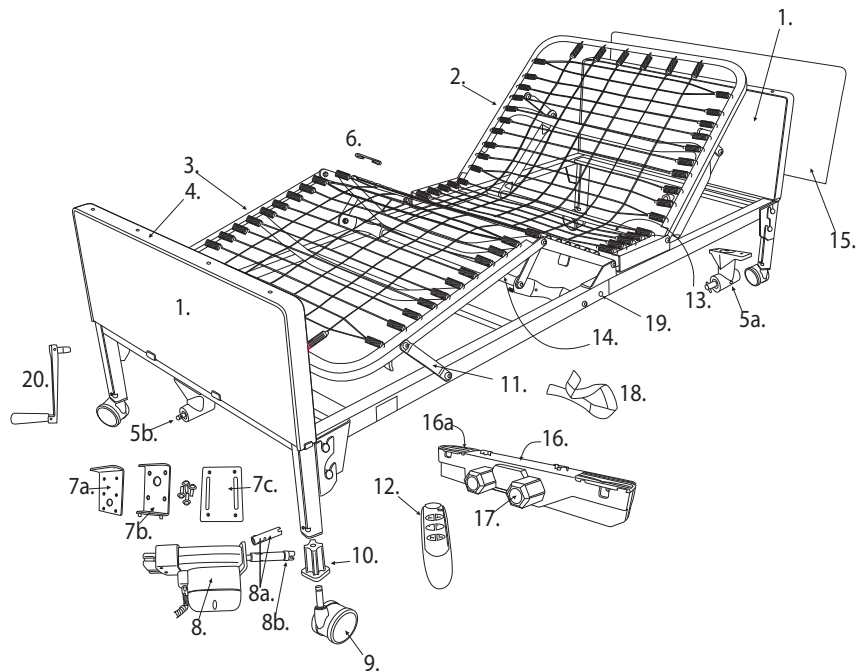

SPÉCIFICATIONS

Électrique	Les moteurs sont approuvés par ETL
Capacité de poids	Total distribué – jusqu'à 450 lb / patient jusqu'à 350 lb
Configuration	Cadre : acier 11 ga (0,120) laminé à chaud. Surface de couchage : fil et bobines d'acier zingué
Finition	Revêtement en poudre durable
Dimensions hors-tout du lit	87,5 po de long x 36 po de large
Hauteur du plateau du matelas (sans matelas)	Minimum – 15,5 po Maximum – 21,5 po
Poids du cadre de lit (assemblé)	169 lb
Angles maximums de la plateforme du matelas	Tête : 75° Pied : 30°
Exigences relatives au matelas	Taille – 80 po de long x 36 po de large x 6 po de profondeur Compatible avec les lits de soins à domicile, par exemple, PBHBMATFB
Exigences relatives aux ridelles latérales	Compatible avec les lits de soins à domicile, semi ou complet (par exemple, PB6034 et PB7035) fabriqués pour être fixés directement au cadre du lit
Batterie	Abaisse la tête et le pied une seule fois, ne soulève pas les sections de la tête ou du pied (9 V non incluse)

GARANTIE LIMITÉE

- Votre produit de marque ProBasics est garanti comme suit :
Cadre – 5 ans
Moteur – 2 ans
Toutes les autres pièces – 1 an
- Cet appareil a été construit conformément à des normes rigoureuses et a été soigneusement inspecté avant son expédition. Cette garantie limitée est l'expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et notre assurance pour l'utilisateur final d'un service fiable pendant des années.
- Cette garantie ne couvre pas la défaillance de l'appareil en raison d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'une usure normale. La garantie ne s'étend pas aux éléments non durables, tels que les accessoires en caoutchouc, les roulettes et les poignées, qui sont soumis à une usure normale et doivent être remplacés périodiquement.
- Si vous avez des questions concernant votre appareil ProBasics ou la présente garantie, veuillez communiquer avec un revendeur ProBasics agréé ou avec Compass Health Brands.

Fabriqué pour

COMPASSHEALTH

6753 Engle Road

Middleburg Heights, Ohio 44130

Tél. : (800) 376-7263

www.compasshealthbrands.com

42-HBFEBED_HBFEBE_HBFESS_05 ©2023

Fabriqué en Chine